




- ▶ 將主機放入拋棄式無線超音波刀開口處，一手持續固定住旋轉頭，另一手將主機旋鈕以順時針旋上。

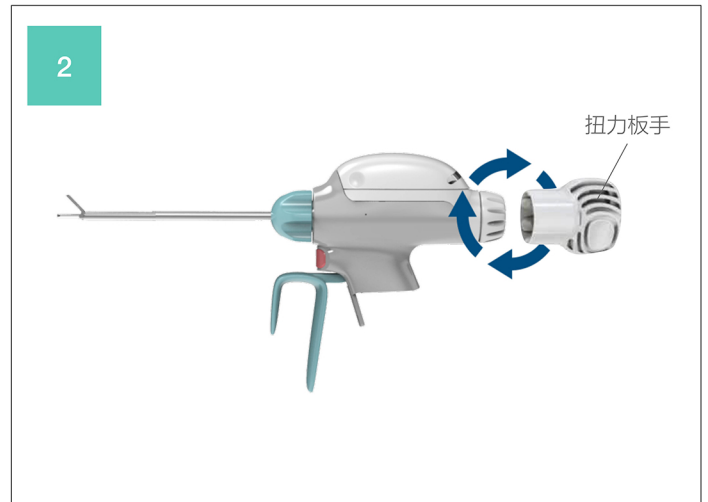

- ▶ 將扭力扳手放入主機旋鈕處。
- ▶ 用扭力扳手順時針轉緊，直至產生兩聲聲響。
- ▶ 將扭力扳手取下。

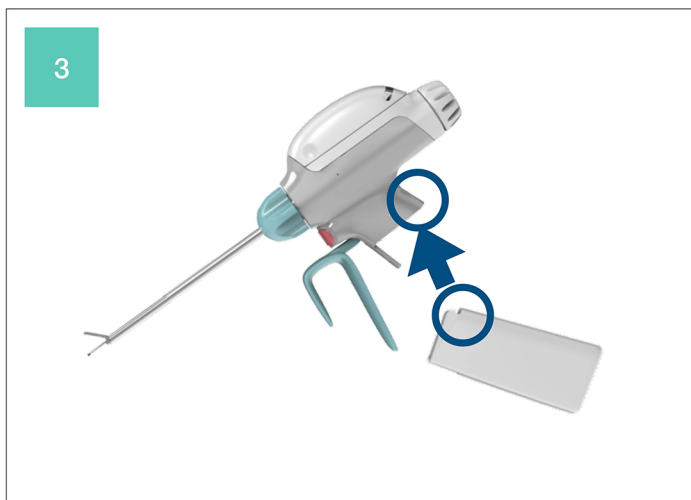

- ▶ 將電池凹頭部分沿著器械下方卡勾處推入。
- ▶ 當正常安裝完成後，主機提示燈會亮起綠燈提示正常，並響起提示音。若無，則需重新檢查器械與主機接合是否正常。

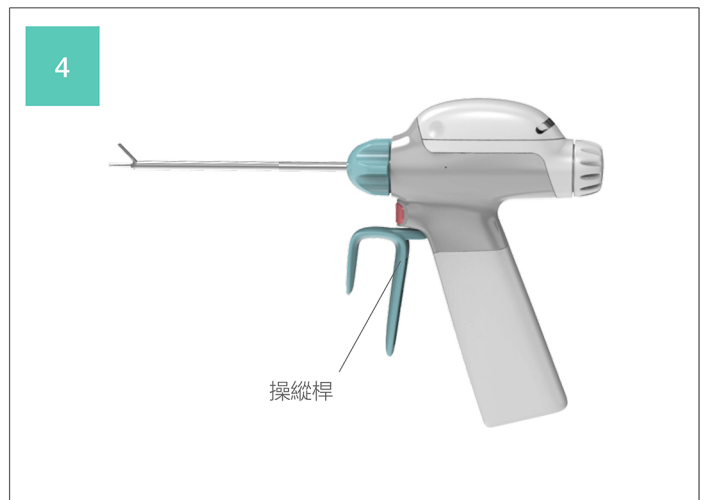

- ▶ 安裝完成後，嘗試使用叉鉗桿，確認前端刀頭能夠正常閉合。
- ▶ 在夾頭打開後按壓開關按鈕，確認產品是否正常運轉。

指示燈號

● 綠燈

系統已準備完成，
可以使用

● 紅燈

裝置無功能，提醒
警示或需障礙排除

● 閃爍黃燈

電池電量少於20%

● 閃爍紫燈

主機達使用上限，
建議採購新主機

○ 燈號未亮起

裝置不能正常運轉